


Din uMic™ oversikt

- 1 Volum opp (+)
- 2 Volum ned (-)
- 3 Strømbryter (I/O)
- 4 Lade-inngang (mini-USB)
- 5 Mikrofon åpning
- 6 Status indikator lys
- 7 Hull for snor
- 8 Feste klipp

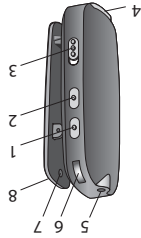

Forstå status lysene

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Informasjon under drift: | |
| Slå på | Grønn 2 sekunder |
| Streaming | Konstant blå |
| Streaming pause | Blå blink |
| Paringsmodus | Raske blå blink |
| Informasjon om strøm og batteri: | |
| Slå på | Grønn 2 sekunder |
| Slå av | Rød 2 sekunder |
| Lading | Konstant rød |
| Fullt oppladet batteri | Konstant grønn |
| Latv batteri varsel | Rød blink i tillegg til hoved lys. |
| uMic hvilemodus/Av | Indikator lyser ikke |

uMic hurtig guide

Medus AS
Postboks 4
2712 Brandbu
Telefon 61 32 90 50



Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



Unitron Hearing GmbH
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany


Distributed by
Hansaton Akustik GmbH
Sachsenkamp 5
D-20097 Hamburg, Germany




92186 DD-SP





Steg 1

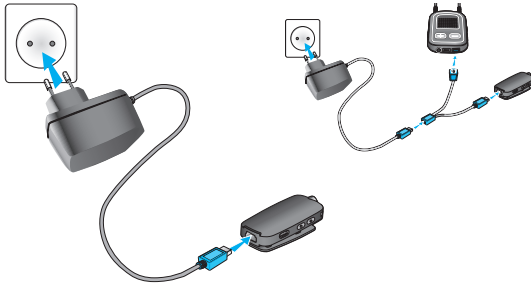


Steg 2

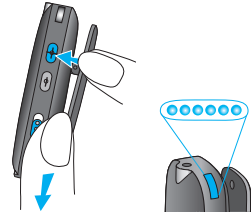

Steg 3

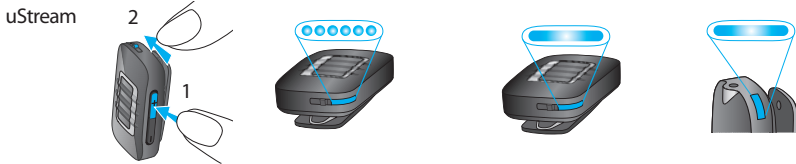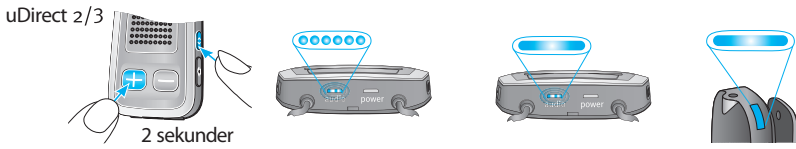


Steg 4

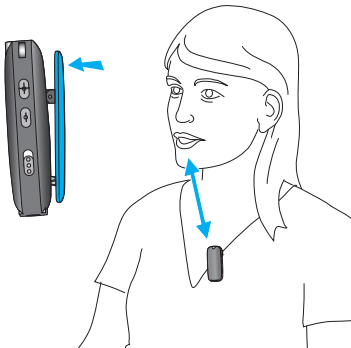

Høreapparat bruker

Taler

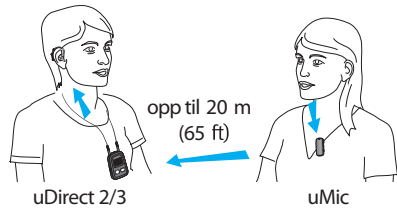

Høreapparat bruker

Taler

