


# Første gang paring til en Apple iPhone.



1. Lad opp og slå på mobiltelefonen
2. Slå av høreapparatene ved å åpne batteriluken og ha høreapparatbatterier klare
3. Plasser mobiltelefonen og høreapparatene ved siden av hverandre

## 4. Forbered høreapparatene for paring

- Sett i nye batterier i høreapparatene
- Slå på høreapparatene ved å lukke batterilukene
- Du har nå 3 minutter på deg til å pare høreapparatene med mobiltelefonen

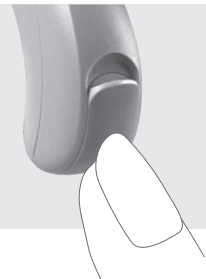

## 5. Forbered mobiltelefonen for paring

Finn tilkoblingsinnstillingene på telefonen. For de fleste modeller gjelder den følgende navigeringen. De **uthevede** uttrykkene kan være noe forskjellig på ulike telefonmodeller.

- Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**
- Forsikre deg om at Bluetooth er slått **på**
- Vent til **R-Hansaton høreapparat** er funnet (eller **L-Hansaton høreapparat**)  
Det kan ta opptil 2 minutter før det dukker opp.
- Velg Hansaton høreapparatet i listen.  
Hvis det er flere Hansaton høreapparater på listen, velg det med **HFP** logo på
- Trykk på **Pare**

**Merk 1:** Hvis audiografen har personalisert dine høreapparater, vil du ikke se **R-Hansaton høreapparat** eller **L-Hansaton høreapparat**, istedet vil du se navnet din audiograf har satt på høreapparatet.

**Merk 2:** Hvis det kommer opp spørsmål om kode, slår du inn **0000** (4 nuller).

## 6. Avslutt paring

- Etter suksessfull paring vil ett høreapparat gi fra seg en varseltone
- I tillegg vil du se et headset-symbol øverst på skjermen på mobiltelefonen
- Etter 3 minutter vil høreapparatet automatisk forlate paremodus. Hvis steg 5 ikke har blitt fullført, starter du bare paremodus i høreapparatene på nytt som beskrevet i steg 4.

Bluetooth® er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc.

Apple, the Apple logo, iPhone, and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

IG-SP