


Førstegangs paring til en HTC mobiltelefon.



1. Lad opp og slå på mobiltelefonen
2. Slå av høreapparatene ved å åpne batteriluken og ha høreapparatbatterier klare
3. Plasser mobiltelefonen og høreapparatene ved siden av hverandre

4. Forbered høreapparatene for paring


- Sett i nye batterier i høreapparatene
- Slå på høreapparatene ved å lukke batterilukene
- Du har nå 3 minutter på deg til å pare høreapparatene med mobiltelefonen

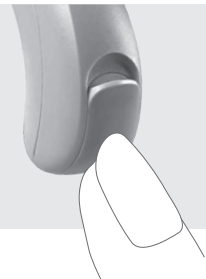

5. Forbered mobiltelefonen for paring

Finn tilkoblingsinnstillingene på telefonen. For de fleste modeller gjelder den følgende navigeringen. De **uthevede** uttrykkene kan være noe forskjellig på ulike telefonmodeller.

Pare smattelefonmodeller (f.eks Desire 601)

- Velg **Applikasjoner**
- Skroll deg ned og velg til **Innstillinger**
- Velg **Bluetooth**
- Forsikre deg om at Bluetooth er slått **PÅ**
- Vent til **R-Hansaton høreapparat** er detektert (eller **L-Hansaton høreapparat**)
Det kan ta opptil 2 minutter før det dukker opp.
- Velg Hansaton høreapparat fra listen. Hvis flere Hansaton høreapparater dukker opp, velg den med telefonrørsymbolet .
- Trykk **OK**

Å pare eldre modeller (f.eks S710)

- Velg **Start** symbolet > **Verktøy**
- Forsikre deg om at Bluetooth er skrudd **PÅ**
- Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**
- Velg **Bluetooth** > **Legg til ny enhet ...**
- Vent til **R-Hansaton høreapparat** er detektert (eller **L-Hansaton høreapparat**)
Det kan ta opptil 2 minutter før det dukker opp.
- Velg Hansaton høreapparat
- Velg **Neste** > **OK** > **Neste** > **Ferdig**

Merk 1: Hvis audiografen har personalisert dine høreapparater, vil du ikke se **R-Hansaton høreapparat** eller **L-Hansaton høreapparat**, istedet vil du se navnet din audiograf har satt på høreapparatet.

Merk 2: Hvis det kommer opp spørsmål om kode, slår du inn **0000** (4 nuller).

6. Avslutt paring

- Etter suksessfull paring vil ett høreapparat gi fra seg en varsel tone
- I tillegg vil du se et headset-symbol øverst på skjermen på mobiltelefonen
- Etter 3 minutter vil høreapparatet automatisk forlate paremodus. Hvis steg 5 ikke har blitt fullført, starter du bare paremodus i høreapparatene på nytt som beskrevet i steg 4.

Bluetooth® er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc..