





# PowerTel 700/702

Bruks-  
anvisning







## PowerTel 700 Cordless håndsett og base

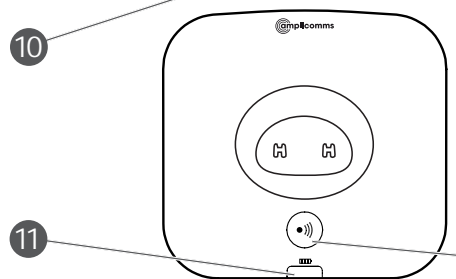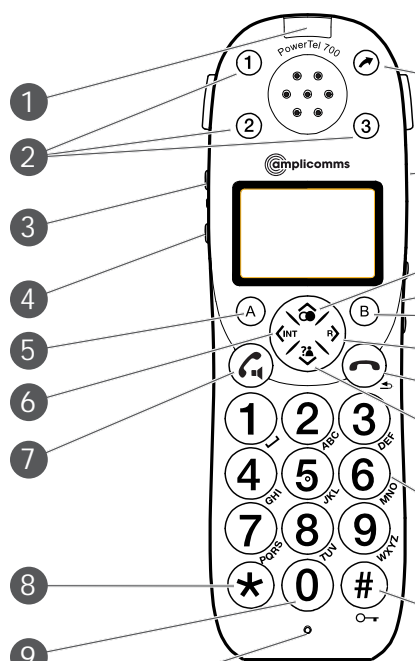

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | Lys, innkommende samtale                    | 12 | Viderekobling                             |
| 2  | Minne 1, 2, 3                               | 13 | Hodesettkontakt (hodesett ikke inkludert) |
| 3  | Forsterkerknapp                             | 14 | Opp/repetisjon                            |
| 4  | Lydmodus                                    | 15 | Volum (+ / -)                             |
| 5  | Åpne meny, dempe, slette                    | 16 | Telefonbok / lagre / Ok                   |
| 6  | Internt anrop                               | 17 | Ring på nytt                              |
| 7  | Eksternt anrop / Handsfree                  | 18 | Avslutt samtale                           |
| 8  | * / Ringer på/av                            | 19 | Ned / Anropsliste / Equaliser             |
| 9  | Pause (Hold inne 0)                         | 20 | Tastatur                                  |
| 10 | Mikrofon                                    | 21 | # / Tastelås                              |
| 11 | Innkommende samtale / Lader / Opptatt linje | 22 | Finn håndsett / Registrering              |

## PowerTel 702 Cordless håndsett og base

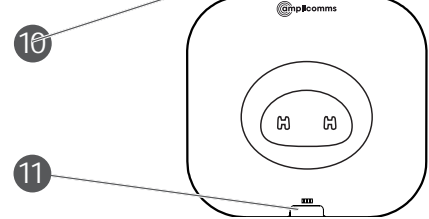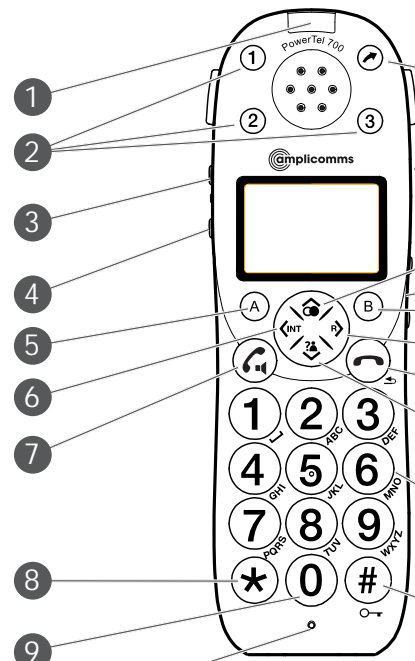

- |    |                            |    |   |
|----|----------------------------|----|---|
| 1  | Lys, innkommende samtale   | 12 | Viderekobling                             |
| 2  | Minne 1, 2, 3              | 13 | Hodesettkontakt (hodesett ikke inkludert) |
| 3  | Forsterkerknapp            | 14 | Opp/repetisjon                            |
| 4  | Lydmodus                   | 15 | Volum (+ / -)                             |
| 5  | Åpne meny, dempe, slette   | 16 | Telefonbok / lagre / Ok                   |
| 6  | Internt anrop              | 17 | Ring på nytt                              |
| 7  | Eksternt anrop / Handsfree | 18 | Avslutt samtale                           |
| 8  | * / Ringer på/av           | 19 | Ned / Anropsliste / Equaliser             |
| 9  | Pause (Hold inne 0)        | 20 | Tastatur                                  |
| 10 | Mikrofon                   | 21 | # / Tastelås                              |
| 11 | Lader                      |    |   |



<b>Kom i gang</b> .....	<b>8</b>
Sjekk innholdet .....	8
<b>Sett opp telefonsystemet i fire enkle trinn</b> .....	<b>9</b>
Koble til basen .....	9
Sett inn batteriene .....	10
Lad opp telefonen .....	10
Koble til telefonkabelen .....	10
Bare for brukere av PowerTel 702 .....	11
Feste belteklipsen .....	12
<b>Skjermikonene på telefonen</b> .....	<b>13</b>
<b>Telefonmenyveiledning</b> .....	<b>15</b>
Hvordan bruke menyvisningen .....	15
Grunnveiledning .....	15
<b>Ring og motta samtaler</b> .....	<b>18</b>
Ring .....	18
Avslutte samtalen .....	18
Motta samtaler .....	18
Repetere et nummer .....	18
Ring opp tidligere innkommende samtale .....	19
Ring et nummer i telefonboken .....	19
Ring et nummer ved å bruke hurtigtaster .....	20
Juster volumet på telefonen .....	20

Forsterke volum på telefonen . . . . .	20
Handsfreefunksjonen . . . . .	20
Bruke handsfreefunksjonen . . . . .	20
Se samtalelengde . . . . .	21
Bruke hodesett (ikke inkludert) . . . . .	21
Slå av mikrofonen . . . . .	21
Skru ringelyden på telefonen av og på . . . . .	21
Slå tastelåsen av og på . . . . .	22
Ringe internt . . . . .	22
Viderekoble samtaler internt . . . . .	23
Start en telefonkonferanse . . . . .	23
Registrere ekstra telefoner . . . . .	24
Avregistrere telefon . . . . .	25
Finne en telefon . . . . .	25
Strømbrudd . . . . .	26
<b>Bruke menyen . . . . .</b>	<b>28</b>
Prioritet/Standardinnstilling . . . . .	28
Brukerprofiler . . . . .	28
Endre profilnavn . . . . .	28
Endre volum på en profil . . . . .	29
Endre forsterkningsinnstillinger på profilen . . . . .	29
Endre toneinnstilling på en profil ('Equaliser') . . . . .	30

Kopier en profil .....	30
Velge profil .....	31
Endre ringemelodi på telefonen .....	32
Endre ringevolum på håndsettet .....	32
Endre Toneinnstilling ('Equaliser') .....	33
Forsterkning på .....	33
Endre navn på håndsettet .....	34
Skru av og på tastelyder .....	34
Endre kontrasten .....	35
Skru av og på "Auto Prat" .....	35
Endre skjermlys timeren .....	36
Slå bekreftelsesignal av eller på .....	36
Velg base .....	37
Endre språkinnstillinger .....	37
Endre dato/tid .....	38
Endre mellom 12 og 24 timers format .....	38
Sette på alarm .....	39
<b>Baseinnstillinger .....</b>	<b>40</b>
Endre ringemelodi på basen .....	40
Endre volum på basen .....	40
Endre PIN-kode .....	41
Avtalebok .....	42

Stoppeklokke .....	43
<b>Bruke kontakboken .....</b>	<b>44</b>
Hvordan bruke tastaturet til å gjøre endringer i kontaktlisten .....	44
Lagre navn og nummer i kontaktlisten .....	45
Endre en kontakt .....	45
Slette en eller alle oppføringer i kontaktlisten .....	46
Kopier kontakter til et annet håndsett .....	46
<b>Bruke hurtigtaster .....</b>	<b>48</b>
Lagre en kontakt til hurtigtastene .....	48
Endre info for en hurtigtast .....	48
Slett lagret hurtigtast .....	49
<b>Bruke samtaleloggen .....</b>	<b>50</b>
Lagre numre fra samtaleloggen til telefonboken .....	51
Lagre numre fra samtaleloggen til hurtigtastene .....	51
Slette en oppføring fra samtaleloggen .....	52
Slett alle oppføringer i samtaleloggen .....	52
<b>Bruk på en privat hussentral .....</b>	<b>54</b>
Angi tidsinnstilling for tilbakekalling .....	54
Legg inn ringepause .....	54
Bruke ytterlige tjenester .....	55
Angi ringemodus .....	55
Tilbakestill til standardinstillinger .....	56



Hvordan tilbake stille et håndsett .....	.56
<b>Hjelp og støtte</b> .....	<b>.58</b>
Feil søknings guide .....	.58
<b>Sikkerhetsinformasjon</b> .....	<b>.62</b>
Tiltenkt bruk .....	.62
Plassering .....	.62
Strømforsyning .....	.63
Medisinsk utstyr .....	.63
Oppladbare batterier .....	.63
Kompatibilitet med høreapparater .....	.63
Deponering .....	.64
Tekniske detaljer .....	.65
Standardinnstillinger .....	.66
<b>Vedlikehold og garanti</b> .....	<b>.67</b>
Vedlikehold .....	.67
Garanti .....	.67
Samsvarserklæring .....	.68



**Kom i gang**

## Kom i gang

**Viktig: Husk å lese sikkerhetsinformasjonen på side 62 før du setter opp telefonen.**

### Sjekk innholdet

Hvis du har kjøpt en PowerTel 700 pakke så skal det være følgende i pakken:

- 1 base
- 1 trådløs telefon
- 1 batterideksel
- 1 belteklips
- 1 strømadapter
- 1 telefonkabel
- 3 oppladbare AAA 1.2V 750mAh NiMH batterier



Hvis du har kjøpt en PowerTel 702 pakke så skal det være følgende i pakken:


- 1 base
- 1 ladestasjon
- 2 trådløse telefoner
- 2 batterideksler
- 2 belteklips
- 2 strømadaptore
- 1 telefonkabel
- 6 oppladbare AAA 1.2V 750mAh NiMH batterier

**Viktig: Ikke bruk andre strømforsyningsenheter en de som følger med PowerTel 700/702, da utstyret kan bli ødelagt.**

# Sett opp telefonsystemet i fire enkle trinn

## 1 Koble til basen


1. Plugg strømadapteren inn i kontakten merket  og den andre enden inn i veggkontakten og slå på strømmen.
2. Plugg telefonkabelen inn i kontakten merket med  på baksiden av telefonbasen, men koble ikke den andre enden inn i veggkontakten enda.

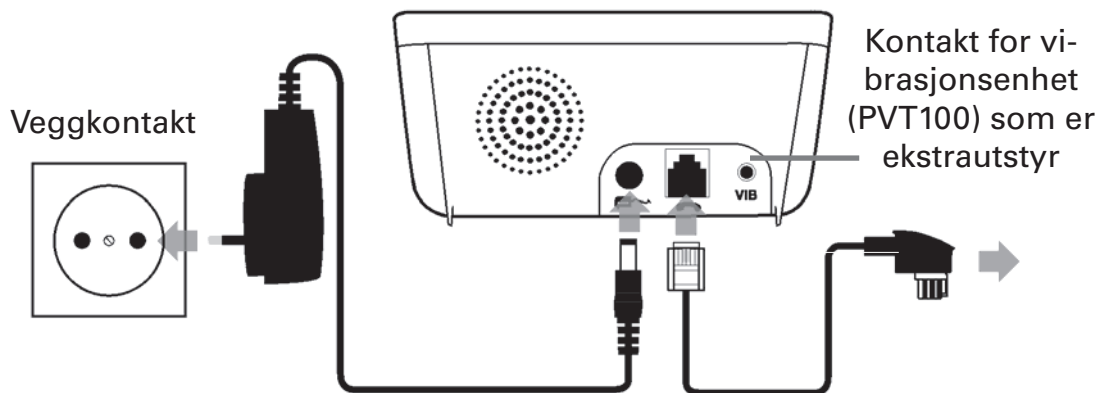

**Viktig: Bruk bare strømadapterene, telefonledningene og batteriene som fulgte med din PowerTel 700 eller 702, ellers kan det hende at telefonen ikke virker. Sikre at tilgang til strømforsyningen ikke er hindret av møbler eller andre objekter.**

## 2 Sett inn batteriene

1. Sett inn de oppladbare i telefonen, pass på at batteriene sitter riktig vei.
2. Sett på batteridekselet på telefonen.

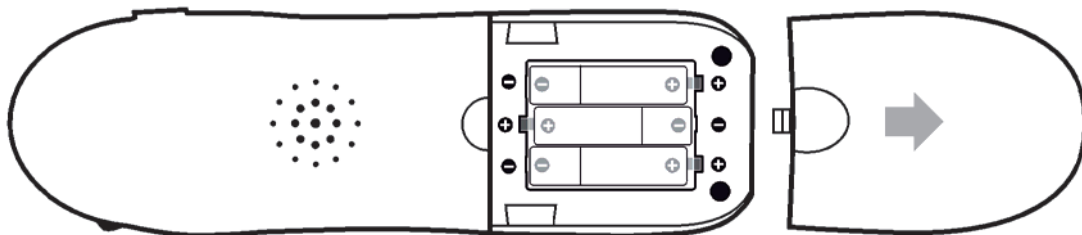

## 3 Lad opp telefonen

For at telefonen skal lades opp helt, skal du sette telefonen til lading i ladebasen i minst 16 timer (kontroller at strømmen er på).

**Viktig: Bruk bare de medfølgende oppladbare 750 mAh NiMH-batteriene. Over tid må du skifte ut batteriene. Sørg da for å erstatte de gamle batteriene med nye av samme type. Bruk aldri alkaliske batterier.**


## 4 Koble til telefonkabelen

Når batteriene er fulladet, skal du plugge enden av telefonkabelen inn i telefonkontakten på veggen.

# Bare for brukere av PowerTel 702

## 1 Koble til ladebasen

Plugg den andre adapteren som allerede er koblet til ladebasen i veggkontakten og slå på strømmen. Sikre at tilgang til strømforsyningen ikke er hindret av møbler eller andre objekter.

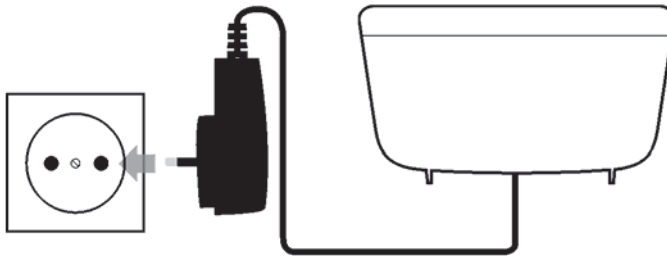

## 2 Sett inn batteriene

Følg instruksjonene på forrige side.

## 3 Lad opp telefonen

For at telefonen skal lades opp helt, skal du sette telefonen til lading i ladebasen i minst 16 timer (kontroller at strømmen er slått på)

## Feste belteklipsen

I esken følger det med en belteklips som du kan feste bak på telefonen om ønskelig. Vend telefonen og fest belteklipsen bestemt inn i de to hullene på hver side av telefonen.

Din PowerTel 700 eller 702 er nå klar til bruk!

**Private sentraler: Hvis telefonen din skal bruke en privat sentral (f.eks hvis du må slå "9" for å få en ekstern linje, må du følge trinnene på side 54.**



# Skjermikonene på telefonen

Ikonene på skjermen og hva de indikerer



Meny



Bekreft / OK



Tilbake



Telefonbok



Det er mer informasjon til venstre



Det er mer informasjon til høyre



Batteristatus



Ringelyd av



En alarm er aktivert



Tastelåsen er på



Handsfree-modus



Anrop pågår



Volum til mottaksforsterkeren er på (ikonet blinker)



Demp mikrofonen på telefonen



Du har nye anrop



Når det lyser konstant er telefonen innenfor basens rekkevidde. Når det blinker er det utenfor basens rekkevidde



Internt anrop pågår

# Telefonmenyveiledning



Bruk denne delen for å bli kjent med menyvisningen på telefonen.

## Hvordan bruke menyvisningen



Når du har satt opp telefonen og alt er koblet til, kan du bruke menyvisningen til å gjøre ting med telefonen – alt fra å ringe og motta anrop til å sette opp brukerprofiler og lagre telefonnumre.

## Grunnveiledning

**Åpne hovedmenyen:** Trykk på .

**Bla i undermenyen:** Åpne hovedmenyen og trykk på  eller .

**Velg post i undermenyen:** Bla med  eller , til posten du ønsker er uthevet og trykk på .

**Bla til en funksjon:** Åpne undermenyen og trykk deretter på  eller .

**Velg en funksjon:** Bla med  eller , til funksjonen du ønsker er uthevet og trykk deretter på .

**Taste inn tall eller bokstaver:** Bruk tastaturet

**Bekreft eller lagre en oppføring eller handling:** trykk på .




**Avbryte og returnere til standbymodus:** trykk på .

**Merk: Hvis du ikke gjør noe, vil telefonen automatisk gå inn i standbymodus etter 30 sekunder.**


# **Ring og motta samtaler**

# Ring og motta samtaler


## Ringe

1. Tast inn nummeret du ønsker å ringe
2. Hvis du taster feil trykk på  for å slette sifrene
3. Start oppringingen ved å trykke på .
4. Avslutt samtalen ved å trykke på .

## Avslutte samtalen


Trykk på .

## Motta samtaler

Løft telefonen ut av basen (Hvis **“Auto Prat”** står på **“På”**, se side 35) og snakk i telefonen, eller hvis telefonen ikke er i basen (eller **“Auto Prat”** står på **“Av”** se side 35), trykk på  og snakk inn i telefonen.

## Repetere et nummer

Telefonen lagrer de 10 siste numrene du har ringt (maks 24 sifre hver).

1. Åpne samtalelisten ved å trykke på .

2. Bla gjennom repetisjonslisten med  eller  til nummeret du ønsker å ringe opp igjen er uthevet og trykk  for å ringe nummeret.








## Ring opp tidligere innkommende samtale

Telefonen lagrer de siste 30 innkommende samtalene.

1. Åpne listen over motatte anrop ved å trykke på .
2. Bla for å finne nummeret med  eller  trykk deretter på .


## Ringe et nummer i telefonboken

For å lagre et nummer i telefonboken, se side 45.

1. Åpne kontaktlisten ved å trykke på .
2. Bla for å finne nummeret med  eller  trykk deretter på  eller skriv den første bokstaven i ønsket oppføring ved hjelp av tastaturet (for eksempel "m" for "Miller". Hvis det er mer enn én oppføring som begynner med "m" bla for å finne riktig nummer med  eller  trykk deretter på .



## Ring et nummer ved å bruke hurtigtaster

For å lagre numre til hurtigtaster, se side 48.


1. Velg hurtigtastnummer ved å trykke på ① , ② eller ③.
2. Trykk på  for å ringe nummeret.

## Juster volumet på telefonen

Volumet på telefonen er høyere enn en vanlig telefon, men kan fremdeles justeres opp og ned slik at det passer deg best.

For å justere volumet samtidig som du er i en samtale trykk på  eller  på høyresiden på telefonen.

## Forsterke volum på telefonen


For å forsterke volumet på telefonen samtidig som du har en samtale trykk på  tasten øverst til venstre på telefonen.

Et ikon av et øre vil blinke på skjermen for å indikere at forsterkning er satt på.




## Handsfreefunksjonen

Bruk handsfreefunksjonen for å snakke med den som ringer uten å holde i telefonen eller for å la andre personer i rommet lytte til samtalen

## Bruke handsfreefunksjonen

1. Skru på handsfree ved å trykke på  to ganger.




2. Avslutt handsfreemodus ved å trykke .
3. For å justere volum på handsfreemodusen trykk på  eller  på høyresiden av telefonen.

**Merk: Man kan ikke bruke forsterkningsfunksjonen i handsfreemodus.**

## Se samtalelengde

Man kan se samtalelengde på displayet under samtalen.

## Bruke hodesett (ikke inkludert)

Plugg hodesettet i kontakten merket med  på høyresiden av telefonen. Denne kontakten kan også brukes med teleslynge hals NL100 (medfølger ikke).

## Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av mikrofonen, slik at den du snakker med ikke hører deg.

For å skru av mikrofonen trykk på . **Demp På** vil dukke opp på skjermen. For å skru den på igjen trykk på  igjen. Det vil da stå **Av** på skjermen

## Skru ringelyden på telefonen av og på

For å skru av og på ringelyden trykk og hold inne  i noen sekunder.

## Slå tastelåsen av og på




Man kan fortsatt svare på innkommende samtaler når telefonen er låst.

For å låse telefonen trykk og hold inne  i 3 sekunder.  Dette ikonet vil dukke opp på skjermen. For å låse opp, hold  inne i 3 sekunder.





**Merk: Viderekobling og interne samtaler er kun tilgjengelig på PowerTel 702 med mindre du har et ekstra handset installert.**

## Ringte internt

Hvis du har 2 eller flere telefoner oppkoblet er det mulig å viderekoble samtaler internt og ringe internt. Hver telefon vil ha et designert nummer (f.eks HS1, HS2 osv) og disse samtalene er gratis.






1. Trykk på  **INT**. Skjermen vil nå vise **Håndsett?** Tast inn nummeret for den interne telefonen du vil ringe, f.eks 2 (for å ringe telefon).
2. For å ta i mot interne samtaler, trykk på .
3. Avslutt en samtale ved å trykke .

## Viderekoble samtaler internt

1. Under en samtale, trykk på  **INT** eller . Tast deretter inn nummeret på telefonen du ønsker å viderekoble til, f.eks **2** (for å ringe til telefon 2).
2. For å besvare en samtale, trykk på .
3. Du kan nå snakke med personen som har den andre telefonen og fortelle at du har en samtale å overføre til dem. Samtalen vil bli overført når du legger på røret ved å trykke på .

**Merk: Hvis ingen svarer på den motagende telefonen kan du hente tilbake den overførte samtalen ved å trykke på .**

## Start en telefonkonferanse


1. Under en ekstern samtale trykk på  **INT** eller . Tast deretter inn nummeret på telefonen du ønsker å legge til i samtalen f.eks **2** (for å ringe til telefon 2).
2. For å ta telefonen og bli med i samtalen trykk på .
3. Når telefonen du har ringt til har svart, aktiver konferansen ved å trykke på .
4. Konferansen vil ende når du trykker på .

## Registrere ekstra telefoner


Du trenger kun å registrere telefonen om den har blitt avregistrert eller om du har kjøpt en ekstra telefon som ikke ligger inne på basen. Du kan ha så mange som 5 telefoner koblet til på en gang.

**Viktig: Vær sikker på at telefonen du vil registrere er fulladet før du kobler den til.**

På telefonen:

1. Trykk og hold  i ca. 10 sekunder. Telefonen vil da be om at du trykker på og holder inne tasten på siden.


På basen:

2. Trykk og hold  inne i 10 sekunder til indikatorlyset på basen blinker.

## Avregistrere telefon


Du må kanskje avregistrere en telefon fordi du har for mange eller det skulle dukke opp en feil på en av dem.

**Viktig: Du kan kun avregistrere andre telefoner enn den du bruker til å gjennomføre avregistreringsprosessen.**

1. Åpne menyen ved å trykke på **(A)**, trykk deretter på  eller  til du kommer til **Håndsett**, trykk deretter **(B)**.
2. Bla med  eller  til du kommer til **Registrering**, trykk deretter på **(B)**.  
Bla med  til du kommer til **Avregistrer** og trykk på **(B)**.
3. Tast inn PIN-koden (Standard PIN 0000) og trykk på **(B)**.
4. Tast inn den interne telefonens nummer (f.eks 1) og trykk på **(B)** for å bekrefte.

## Finne en telefon

Telefonene har en innebygd lydfunksjon som gjør det mulig å finne en telefon som er mistet.

1. Trykk på  på basen. Telefonen vil lage en pipelyd.
2. Trykk på hvilken som helst av knappene på telefonen for å stoppe pipelyden.

## Strømbrudd

Telefonen kan ikke brukes til å ringe når strømmen har gått. Sørg for at telefonen alltid er koblet til telefonkontakten, som har en egen ekstern strømkilde i tilfelle nødsituasjoner.

**Bruke menyen**

## Bruke menyén

For mer informasjon om kontaktlisten se side 44.

### Prioritet/Standardinnstilling











Hvis det kun er du som skal bruke denne telefonen burde du stille inn telefonen etter dine egne preferanser. Disse innstillingene blir gjeldende for alle innkommende og utgående samtaler.

Brukerprofilene kan brukes for at andre i husholdningen kan lagre sine egne preferanser for volum, forsterkning og equalizer.

### Brukerprofiler

Du kan lagre 2 profiler på hver telefon, hver av dem med forskjellige innstillinger for volum, forsterkning og equalizer. Man kan også navngi hver profil.(maks 11 bokstaver eller tall).

### Endre profilnavn









1. Åpne menyen ved å trykke på  (A), og bla med  eller  til du uthever **Profil**, trykk deretter på  (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Profil 1 / 2** og trykk på  (B).
3. Bla med  eller  til du kommer til **Navn** og trykk på  (B).









4. Slett nåværende navn ved å trykke på (A).
5. Tast inn nytt navn (opptil 11 bokstaver eller tall), og trykk på (B).


## Endre volum på en profil

Du har valget mellom 5 volumnivåer.



1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Profil**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Profil 1 / 2** og trykk på (B).
3. Bla med  eller  til du kommer til **Volum** og trykk på (B).
4. Du vil nå se volumnivået på profilen (f.eks 4)..
5. Endre innstillingen ved å trykke på  eller  og trykk på (B).



## Endre forsterkningsinnstillinger på profilen



1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Profil**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Profil 1 / 2** og trykk på (B).
3. Bla med  eller  til du kommer til **Øk** og trykk på (B).
4. Du vil nå se om **Øk** er av eller på.

5. Endre innstillingen ved å trykke på  eller  og trykk på **(B)**.

## Endre toneinnstilling på en profil ('Equaliser')

1. Åpne menyen ved å trykke på **(A)**, og bla med  eller  til du uthever **Profil**, trykk deretter på **(B)**.

2. Bla med  eller  til du kommer til **Profil 1 / 2** og trykk på **(B)**.

3. Bla med  eller  til du kommer til **Equaliser** og trykk på **(B)**.



4. Du får se den gjeldende toneinnstillingen.


5. Endre innstillingen ved å trykke på  eller  og trykk på **(B)**.



**Trykk på  for å få telefonen tilbake i standbymodus**

## Kopier en profil

Du kan lett kopiere en profil til andre håndsett, så lenge de er av samme type.

1. Åpne menyen ved å trykke på **(A)**, og bla med  eller  til du uthever **Profil**, trykk deretter på **(B)**.

2. Bla med  eller  til du kommer til **Profil 1 / 2** og trykk på **(B)**.

3. Bla med  eller  til du kommer til **Kopi** og trykk på **(B)**.

4. Bla med <INT eller R> til du kommer til håndsettet (f.eks 2,3 eller 4) du vil kopiere profilen til, trykk deretter på (B).
5. På håndsettet du vil kopiere til: For å godkjenne: trykk på (B) eller for å avbryte trykk på (A).

## Velge profil

Du må bruke et håndsett(telefon) til å endre profil, du kan ikke endre profil når du har handsfreemodus på.












Før du besvarer en innkommende samtale, trykk på knappen "Profile setting" på venstresiden, flere ganger om nødvendig, avhengig av hvilken profil du vil bruke. Valget vil dukke opp på skjermen.

Når du ønsker å foreta en samtale, trykk på profilknappen på venstre siden av telefonen og velg ønsket profil, profilvalget vil dukke opp på skjermen.

**Merk: Når du har valgt profil, vil du ha ca 30 sekunder til å foreta en samtale før telefonen returnerer til standardinnstillingene.**










## Endre ringemelodi på telefonen

Det finnes 10 forskjellige toner å velge mellom.











1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på .
2. **Ringetone** blir synlig, trykk på .
3. Bla med  eller  til du kommer til **Ekstern** eller **Intern** og trykk på .
4. Melodinstillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks **7 [Ekstern]**, **9 [Intern]**).
5. Endre melodi ved å trykke på  eller  og trykk på .




## Endre ringevolum på håndsettet

Du har valget mellom 5 volumnivåer og lydløs.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på .
2. Bla med  til du kommer til **Ringevolum** og trykk på .
3. Volumnivået vil dukke opp på skjermen (f.eks 5).
4. Endre volumnivået ved å trykke på  eller  og trykk på .

## Endre Toneinnstilling ('Equaliser')

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **Equaliser** og trykk på .
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen.
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på .


**Merk:** for å justere tonen når du foretar en samtale, trykk på  knappen. For å gå til equaliserinstillingen. Trykk deretter på  eller  knappene for å justere grafen opp eller ned.







## Forsterkning på

Når "forsterkning" (**Øk**) er slått på, vil den hele tiden være aktiv. Indikatorlyset for forsterkning vil lyse, og det vil stå "**BOOST ER PÅ**" på skjermen.





Du kan trykke på  knappen til å skru den av for en samtale.

Den vil være aktiv igjen neste samtale.





Hvis forsterkningsinstillingen står på Av, må den skrues på manuel ved å trykke på  knappen. For neste samtale vil funksjonen være avslått igjen.



1. Åpne menyen ved å trykke på **(A)**, og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på **(B)**.
2. Bla med  eller  til du kommer til **Øk** og trykk på **(B)**.
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks Av).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på **(B)**.

## Endre navn på håndsettet

1. Åpne menyen ved å trykke på **(A)**, og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på **(B)**.
2. Bla med  eller  til du kommer til **Håndsett Navn** og trykk på **(B)**.
3. Slett eksisterende navn ved å trykke på **(B)**.
4. Tast inn nytt navn (Opptil 11 bokstaver) og trykk på **(B)**.







## Skru av og på tastelyder

1. Åpne menyen ved å trykke på **(A)**, og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på **(B)**.
2. Bla med  eller  til du kommer til **Tastatur Pip** og trykk på **(B)**.
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks På).


4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på (B).







## Endre kontrasten

Du har valget mellom 5 forskjellige kontraster på skjermen, hvor du kan velge ut den som gjør at skjermen er tilpasset deg best mulig.

1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Kontrast** og trykk på (B).
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks 3).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på (B).











## Skru av og på "Auto Prat"

Når "Auto Prat" er slått på, vil telefonen automatisk besvare innkommende samtaler når du tar håndsettet ut av basen. Dette er standardinstilling. Hvis du skrur den av, må du trykke på  for å besvare en samtale.

1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Auto Prat** og trykk på (B).
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks På).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på (B).











## Endre skjermlys timeren

Du har valget mellom 10, 20, 30 eller 40 før bakgrunnsbelysningen vil slutte å lyse.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **Baklys Tid** og trykk på .
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks 10 s).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på .

## Slå bekräftelsesignal av eller på







Dette er pipetonen du hører når du endre en instilling. Denne pipetonen kan slås av eller på.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **Bekreft Pip** og trykk på .
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks On).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på .









## Velg base

Du kan bruke denne innstillingen når du har flere enn én base.





1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Velg Base** og trykk på (B).
3. Gjeldende baseinnstilling vil nå dukke opp på skjermen (**Auto** eller **Manual**), og står den på manuell, kan du velge hvilken base du ønsker å koble håndsettet til.
4. Endre innstillingen ved å trykke på  eller  og trykk på (B).

## Endre språkinnstillinger







Du har valget mellom forskjellige språk på telefonen.

1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Håndsett**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Språk** og trykk på (B).
3. Innstillingen vil dukke opp på skjermen.
4. Endre innstillingen ved å trykke på  eller  og trykk på (B).





## Endre dato/tid

1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Tid**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Dato og Tid** og trykk på (B).
3. Tast inn måned, dag, timer og minutter (Telefonen har 24-timersklokke) og trykk deretter på (B).

## Endre mellom 12 og 24 timers format

1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Tid**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Sett Tidsfor.** og trykk på (B).
3. Det gjeldende formatet vil nå dukke opp på skjermen. (f.eks 24H)
4. Endre tidsformatet ved å trykke på  eller  til du kommer til enten 12 eller 24 timersformatet og trykk på (B).

## Sette på alarm









1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Tid**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Sett Alarm** (alarmen bruker 24 timersformat) og trykk på (B).
3. Velg mellom **En gang**, **Hver Dag**, **Man-Fre** eller **Av**. Trykk så på (B).
4. Tast inn tidspunktet du ønsker at alarmen skal gå av og trykk deretter på (B).
5. Velg alarmelodi til slutt og bekreft med (B).

For å bekrefte alarmen, trykk på (A), trykker du (B), aktiveres slumrefunksjonen. Med denne funksjonen vil alarmen gjentas opptil 5 ganger før den slås helt av.

## Baseinstillinger










### Endre ringemelodi på basen

Det finnes 9 forskjellige ringetoner på basen.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Base Innstill**, trykk deretter på .
2. **Ringetone** blir uthevet, trykk på .
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks 6).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på .

### Endre volum på basen










Du har valget mellom 5 volumnivåer på basen, inkludert OFF.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Base Innstill**, trykk deretter på .
2. Trykk på  til du kommer til **Ringevolum** og trykk på .
3. Instillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks 5).
4. Endre instillingen ved å trykke på  eller  og trykk på .

For informasjon om ringe modus, vennligst gå til side 55.












For informasjon om recall, vennligst gå til side 54.

## Endre PIN-kode

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Base Innstill**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **System PIN** og trykk på .
3. Tast inn din gamle PIN-kode, (standardkoden er 0000) og trykk på .
4. Telefonen vil be deg om å taste inn en ny firesifret PIN-kode to ganger.  
Trykk til slutt på .

## Avtalebok





Du kan legge inn opptil fem avtaler som telefonen vil minne deg på.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Verkt.**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **Avtale** og trykk på .
3. Bla med  eller  til du kommer til **1, 2, 3, 4** oder **5** og trykk på .
4. Bla med  eller  til du kommer til **Redig.** og trykk på .
5. Slett bokstaver med , tast inn et nytt navn på avtalen ved å bruke tastaturet og trykk på .
6. Tast inn datoen på tastaturet og trykk på .
7. Tast inn tidspunktet og trykk på .
8. Velg en melodi med  eller  og trykk på .

**Hvis du ønsker å endre eller slette en oppføring, gå inn på måten det er beskrevet ovenfor og velg "Redig." eller "Slett".**

## Stoppeklokke

Stoppeklokken teller ned i timer og minutter.

1. Åpne menyen ved å trykke på (A), og bla med  eller  til du uthever **Verkt.**, trykk deretter på (B).
2. Bla med  eller  til du kommer til **Stans Kl.** og trykk på (B).
3. Trykk på (B) for å starte klokken.
4. Trykk på (A) for å stoppe klokken.

**Hvis du har stoppet klokken, kan du starte den igjen ved å trykke "Start" eller ved å trykke på "Nullst", hvis du trykker på "Nullst" vil den starte på nytt med nedtellingen.**

## Bruke kontakboken

Du kan lagre opptil 200 navn og numre på telefonen, for å finne en kontakt, trykk ganske enkelt på den første bokstaven i navnet på en kontakt, da vil den dukke opp på skjermen.

**Merk: Du kan lagre kontakter med opptil 16 bokstaver i navnet, og 24 siffer i nummeret.**

## Hvordan bruke tastaturet til å gjøre endringer i kontaktlisten

Di på hver eneste tast er det et siffer og opptil 3 bokstaver, trykker du mange nok ganger på en tast, så vil alle bokstavene komme opp.









Her er noen knapper du helt sikkert vil få bruk for når du skal bruke kontaktlisten:

- Trykk på **1** for mellomrom
- Trykk på **1** eller **0** for spesialtegn
- Trykk på **A** for å slette en oppføring
- Trykk på **\*** for å velge mellom små og store bokstaver (ABC/abc)













**Merk: For å taste inn en bokstav to ganger rett etter hverandre, trykk først inn en gang, og vent i 2 sekunder til.**











## Lagre navn og nummer i kontaktlisten

1. Åpne kontaktlisten ved å trykke på .
2. Trykk på . Du vil nå komme til **Ny Inntast**. Trykk på  igjen.
3. Tast inn navnet du ønsker å lagre en kontakt som og trykk på .
4. Tast inn nummeret du ønsker å lagre til en kontakt og trykk på .
5. Bla med  eller  for å velge ringemelodi for denne kontakten.  
Trykk på .

## Endre en kontakt

1. Åpne kontaktlisten ved å trykke på .
2. Bla med  eller  til du finner kontakten du vil endre, og trykk på .
3. Det vil stå **Redig. Inntast**, på skjermen. Trykk på  igjen.
4. Trykk på  for å slette og endre det nåværende navnet på en kontakt og trykk på .
5. Trykk på  for å slette og endre nummeret som er lagret til en kontakt og trykk på .
6. Bla med  eller  for å velge ringemelodi for denne kontakten.  
Trykk på .

## Slette én eller alle oppføringer i kontaktlisten

1. Åpne kontaktlisten ved å trykke på .
2. Bla med  eller  for å finne kontakten du vil slette, eller om du vil slette alle kontaktene, og trykk på .
3. Trykk på  til du kommer til "Slett Inntast" eller "Slett Alt" og trykk på .
4. Trykk på  for å bekrefte, eller  for å avbryte.






## Kopier kontakter til et annet håndsett

**Merk: Kontakter kan kun kopieres om et handset er koblet til samme base.  
Se side 24.**

Det er enkelt å kopiere en kontakt:

- En enkelt inntasting (Kopi Inntast)
- Kontakter som ikke allerede er lagret (Kopi Vedl.)
- Alle kontakter (Kopi Alt)



**Viktig: Når du kopierer alle kontaktene fra et håndsett, vil alle kontaktene som allerede er lagret bli slettet, for å unngå dette, bruk "Kopi Vedl."**

1. Åpne kontaktlisten ved å trykke på (B).
2. Bla med  eller  til du finner kontakten du ønsker å kopiere og trykk på (B).
3. Bla med  til **Kopi Inntast**, **Kopi Vedl.** eller **Kopi Alt** og trykk på (B).
4. Bla med  **INT** eller  **R** til du kommer til det håndsettet du ønsker å kopiere til (f.eks 2 for Håndsett 2) og trykk på (B) for å bekrefte.
5. Finn deretter håndsettet du ønsker å kopiere til, og trykk på (B).

## Bruke hurtigtaster



Du kan lagre et navn (max. 16 bokstaver) og et telefonnummer (max. 24 tall) til hver av hurtigtastene: ①, ② og ③.

### Lagre en kontakt til hurtigtastene


1. Velg hurtigtasten du ønsker å lagre en kontakt til ved å trykke på ①, ② eller ③.
2. Trykk på **B**. **Redig. Inntast** vil nå dukke opp på skjermen, trykk på **B** igjen.
3. Tast inn navnet du ønsker å bruke på hurtigtasten og trykk på **B**.
4. Tast inn nummeret du ønsker å bruke på hurtigtasten, og trykk på **B**.
5. Bla med  eller  for å velge ringemelodi for denne kontakten og trykk på **B**. **Inntast Lagret** vil nå dukke opp på skjermen.

### Endre info for en hurtigtast

1. Endre en hurtigtast ved å trykke på ①, ② eller ③.
2. Trykk på **B**. **Redig. Inntast** vil nå dukke opp på skjermen, trykk på **B** igjen.

3. Trykk på **(A)** for å slette alle bokstavene og endre dem i en kontakt, og deretter trykk på **(B)**.
4. Trykk på **(A)** for å slette nummeret og tast inn et nytt, og deretter trykk på **(B)**.
5. Bla med  eller  for å velge ringemelodi for denne kontakten og trykk på **(B)**. **Inntast Lagret** vil nå dukke opp på skjermen.

## Slett lagret hurtigtast

1. Velg hvilken hurtigtast du vil åpne ved å trykke på **(1)**, **(2)** eller **(3)**.
2. Trykk på **(B)**. Bla med  til du kommer til **Slett Inntast** og trykk på **(B)**.
3. **Slette Innlegg?** vil dukke opp på skjermen, trykk på **(B)** for å bekrefte, eller **(A)** for å avbryte.





## Bruke samtaleloggen

Inkommende samtaler vil dukke opp i samtaleloggen. Hvis du har lagret nummeret i kontaktlisten vil navnet på kontakten dukke opp.

Listen over tidligere samtaler lagrer de siste 30 inkommende samtalene.











Antallet nye anrop vil stå oppført ved siden av  ikonet.

Hvis nummeret ikke dukker opp, er dette fordi det er et reservert nummer (skjult id), eller et nettverksproblem.

Du kan åpne listen ved å trykke på  knappen. For å bla igjennom samtalelisten, trykk på  eller . For å se mer informasjon om en samtale, som dato, tid og varighet, trykk på .







## Lagre numre fra samtaleloggen til telefonboken

Det er veldig enkelt å lagre nye kontakter fra samtaleloggen.








1. Trykk på  for å åpne samtaleloggen.
2. Bla med  eller  for å finne nummeret du ønsker å lagre og trykk på .
3. **Lagre Nummer** vil dukke opp på skjermen, trykk på .
4. Tast inn navnet du ønsker å lagre den nye kontakten som og trykk på .
5. Endre nummeret om nødvendig og trykk på .
6. Bla med  eller  for å velge ringemelodi for denne kontakten og trykk på .

## Lagre numre fra samtaleloggen til hurtigtastene







Det er veldig enkelt å lagre numre fra samtaleloggen og inn på hurtigtastene.

1. Trykk på  for å åpne samtaleloggen.
2. Bla med  eller  till du finner nummeret du ønsker å bruke og trykk på .
3. Bla med  til **Lagre til M1 / M2 / M3** og trykk på .
4. Fortsett på samme måte som om du skulle ha lagret til telefonboken, som beskrevet ovenfor.

## Slette en oppføring fra samtaleloggen

1. Trykk på  for å åpne samtaleloggen.
2. Bla med  eller  till du finner oppføringen du ønsker å slette og trykk på .
3. Bla med  til du kommer til **Slett**.
4. Trykk på  for å bekrefte, eller  for å avbryte.

## Slett alle oppføringer i samtaleloggen

1. Trykk på  for å åpne samtaleloggen. Trykk deretter på .
2. Bla med  til du kommer til **Slett Alt** og trykk på .
3. Det vil nå stå **Slette alle?** på skjermen, trykk på  for å bekrefte, eller  for å avbryte handlingen.













# **Bruk på en privat hussentral**

## Bruk på en privat hussentral


Hvis telefonen er koblet til en hussentral (f.eks hvis du må trykke på 9 for å få en ekstern linje), kan du overføre og tilbakekalle disse med knappen R. du Må sjekke bruksanvisningen til den private hussentralen for å finne ut hvilke tidsinnstillinger du skal velge. Du kan velge mellom to tidsinnstillinger for tilbakekalling: 100ms (kort) og 300ms (lang).

### Angi tidsinnstilling for tilbakekalling

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Base Innstill**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **Tilb.kall** og trykk på .
3. Den gjeldende innstillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks Short).
4. Velg hvilken innstilling du ønsker å bruke (**Kort** eller **Lang**) ved å trykke på  eller  og trykk på .

### Legg inn ringepause

Hvis du skal ringe et eksternt nummer og det tar lang tid å koble opp, kan du legge inn en ringepause for å slippe å høre på summetonen.

For å legge til en ringepause, tast ganske enkelt inn nummeret du vanligvis gjør og hold inne  i 2 sekunder. En "P" vil dukke opp på skjermen når pausemodus er aktivert.











**Merk: du kan også legge inn en ringepause med et telefonnummer i telefonboken**

## Bruke ytterlige tjenester

Telefonen din skal støtte tjenester som samtale venter og konferansesamtaler. Du må sjekke med nettverksleveradøren for mer informasjon om disse tjenestene.

## Angi ringemodus

Du har valget mellom to ringemoduser: Tone og Puls. Standardinnstillingen er TONE og dette er riktig innstilling for bruk i europa.

1. Åpne menyen ved å trykke på , og bla med  eller  til du uthever **Base Innstill**, trykk deretter på .
2. Bla med  eller  til du kommer til **Ringemodus** og trykk på .
3. Den gjeldende innstillingen vil dukke opp på skjermen (f.eks Tone).
4. Vel hvilken innstilling du ønsker å bruke (**Tone** eller **Puls**) ved å trykke på  eller  og trykk på .

## Tilbakestill til standardinstillinger

**Viktig: Hvis du tilbakestiller et håndsett til standardinstillinger vil alle data fra kontakliste, samtalelogg og hurtigtaster slettes.**

### Hvordan tilbakestille et håndsett

1. Hold inne **R** i 10 sekunder.
2. Bekreft tilbakestillingen ved å trykke på **(B)** for Yes (ja) eller **(A)** for No (nei).

# Hjelp og støtte

## Hjelp og støtte

Les gjennom de følgende henvisningene hvis utstyret ikke fungerer som det skal.

Ved tekniske problemer bes du ta kontakt med vår kundeservice.

Telefonnummeret finner du på vår hjemmeside **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Ved reklamasjonskrav bes du ta kontakt med din forhandler. Garantien gjelder i 2 år.

**Noen problemer kan enkelt løses ved å koble enheten fra strømmettet. I slike tilfeller skal du slå av strømmen til hovedbasestasjonen og du skal også ta ut batteriene i håndsettet i ca. 20 minutter. Deretter kobler du alt til igjen for å sjekke om problemet er løst.**

## Feil søknings guide

### Jeg kan ikke ringe

1. Kontroller at telefonkabelen er riktig tilkoblet. Hvis den er tilkoblet, kan det være en feil. Kontroller at du bruker telefonkabelen som fulgte med telefonen.
2. Kontroller at strømkabelen er plagget i, og at apparatet er slått på og fungerer.
3. Kontroller at du er innenfor rekkevidde til basen (Ideelle forhold for basen er maks 50 meter innendørs og 300meter utendørs).
4. Test telefonlinjen og kontakten ved å prove en annen telefon.



### **Jeg mister forbindelsen hele tiden**

1. Forsikre deg om at du er innenfor basens rekkevidde (opptil 50 meter innendørs og 300 meter utendørs)
2. Basen er muligens ikke plassert optimalt – vurder å flytte den.

### **Håndsettet slår seg av hele tiden**

1. Det kan trenge oppladning, prøv å lade det i basen i minimum 16timer (Sørg for at strømmen er slått på!).
2. Bytt batterier, alle batteriene burde erstattes av liknende type batterier.

### **Telefonsystemet fungerer ikke**

Du må kanskje tilbake stille til standardinnstillinger. Se side 56.

### **Caller's identification (Vise innkommende nummer)**

Den som ringer har muligens reservert sitt eget telefonnummer.

### **Basen lager ikke ringetone**

Sjekk at ringetone og volum er slått på. Se side 21, 32 og 40.

### **Jeg får bakgrunnstøy på tv, telefon eller datamaskin.**

For å unngå bakgrunnstøy fra telefonen anbefaler vi at du holder minimum 1 meters avstand fra disse og liknende tekniske artikler.

**Det er forstyrrelser og/eller internettet blir veldig tregt når jeg bruker telefonen.**

Du må koble telefonen direkte inn i en veggkontakt med adsl-filter hvis du har internett via telefonlinjen.



# **Generell informasjon**

## Sikkerhetsinformasjon

Sørg for å lese denne brukerveiledningen nøye.

### Tiltenkt bruk

Denne telefonen er egnet til bruk på et offentlig telefonnettverk. All annen bruk anses å være feil bruk. Uautorisert modifisering eller rekonstruksjon er ikke tillatt. Apparatet må ikke åpnes og du må ikke forsøke å reparere apparatet selv.

### Plassering

Sørg for at telefonen er plassert i henhold til følgende retningslinjer

- Sørg for at telefonen står på en tørr, flat og stabil overflate.
- Sørg for at ledningene ikke ligger i klem
- Sørg for at telefonen er minst 1 meter ifra andre elektroniske artikler
- Sørg for at telefonen ikke er utsatt for røyk, støv, vibrasjoner, kjemikalier, fuktighet, varme eller direkte sollys i store mengder.

## Strømforsyning

**Viktig: Bruk kun strømadaptere som leveres med PowerTel 700 eller 702.**

Strømprudd kan påvirke telefonen og utstyret. Denne telefonen kan ikke brukes til å ringe med ved strømprudd. Det bør iverksettes alternative ordninger for tilgang til nødetatene.

### Energieffektiv strømadapter

Den inkluderte nettadapteren oppfyller EU-kravene til “eco-design” (Direktiv 2005/32/EG). Dermed er strømforbruket betydelig lavere, både i aktiv og passiv modus, sammenlignet med nettadaptere til tidligere modeller.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

## Medisinsk utstyr

Bruk ikke telefonen:

- Nær medisinsk utstyr eller medisinsk behandlingsutstyr
- Under en elektrisk storm (f.eks torden)

## Oppladbare batterier

Kast ikke batteriene i åpen ild eller vann.

## Kompatibilitet med høreapparater

Telefonen virker med de vanligste høreapparatene. Men det store utvalget av forskjellige typer apparater tatt i betraktning, kan vi ikke garantere at din telefon vil fungere fullt ut med alle høreapparater.

**Viktig: Telefonen kan produsere svært høy lyd når forsterkningen er slått på.**

## Deponering

Deponering av forbruksartikler skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter.

Symbolet på produktet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må kasseres separat fra husholdningsavfall ved dedikerte innsamlingssteder.

Batterier kan ofte kasseres der de ble kjøpt.

Emballasjen må kasseres i samsvar med lokale forskrifter.

**Batterier er farlig for naturen og miljøet.**

Aldri kast batterier i naturen. De inneholder ofte syre som kan være skadelig for naturen og miljøet.



## Tekniske detaljer

Standard	DECT <sup>1</sup> GAP <sup>2</sup>
Strømforsyning (basestasjon)	Input: 100-240V 50/60Hz Output: 6 VDC 800 mA
Rekkevidde	Utendørs opptil 300 m Innendørs opptil 50 m
Standbymodus	Opptil 100 Std.
Maksimum taletid	Opptil 10 Std.
Maks volum på telefonen	+40dB (distortion < 1,5 %)
Oppladbare batterier	AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
Ringemodus	Tone (DTMF), Puls
Optimal romtemperatur	0 °C til 45 °C
Optimal luftfuktighet	20 % til 80 %
Tilbakekall	100, 300 ms

<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = standard for vanlige telefoner

<sup>2</sup> GAP: Generic Access Profile = standard for bruk av håndsett og basestasjoner fra forskjellige produsenter.

## Standardinnstillinger

For å tilbakestille til standardinnstillinger se side 56.

Språk	Norsk
Håndsettnavn	PowerTel
Ringemelodi på håndsett (ekstern)	7
Ringemelodi på håndsett (intern)	9
Ringevolum for håndsett	5
Ringemelodi på basen	3
Ringevolum for basen	3
Tastelyd	On
Auto talk	On
Contrast	3
Backlight time	10 s
Boost on	Off
Recall time	100 ms
Dialling mode	Tone
PIN code	0000

# Vedlikehold og garanti

## Vedlikehold

- Rengjør overflatene på apparatet med en myk, lofri klut.
- Bruk aldri rengjøringsmidler eller løsemidler.

## Garanti

AMPLICOMMS-utstyr produseres og testes med de nyeste produksjonsfremgangsmåtene. Bruken av samvittighetsfullt utvalgte materialer og høyt utviklede teknologier sikrer en drift uten forstyrrelser og med lang levealder.

Garantibetingelsene gjelder ikke hvis årsaken til forstyrrelsen på utstyret ligger hos telefoninettoperatøren eller i et eventuell mellomledd. Garantien gjelder ikke for oppladbare batterier, ladere eller batteripakker som brukes i produktene.

Garantitiden varer i 24 måneder fra og med kjøpsdato.

I løpet av garantitiden korrigeres alle mangler som skyldes materialfeil eller produksjonsfeil, gratis. Garantien opphører ved inngripen fra kjøper eller tredjeperson. Garantien gjelder ikke ved skader som oppstår som følge av inadekvat behandling eller betjening, gal plassering eller lagring, inadekvat tilkobling eller installasjon, høyere makter eller annen ytre påvirkning.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller bytte ut defekte deler eller stille nytt utstyr til rådighet. Deler eller utstyr som blir byttet ut, tilfaller oss.

Skadeerstatning er utelukket hvis det ikke kan påvises at produsenten har vært forsettlig eller grov uaktsom.

Hvis utstyret blir defekt i løpet av garantitiden, tar du kontakt med butikken hvor du kjøpte AMPLICOMMS-utstyret og viser frem kvitteringen. Reklamasjonskrav i henhold til disse bestemmelsene kan kun fremmes overfor forhandleren. Ingen garantikrav kan gjøres gjeldende mer enn to år etter at produktene ble kjøpt.

## **Samsvarserklæring**



Denne enheten oppfyller kravene som angitt i EU-direktivet: EU-direktiv 1999/5 Om radio-utstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar.

Konformitet med ovennevnte direktiv bekreftes med CE-symbolet på apparatet. For å se hele samsvarserklæringen, se gratis nedlastning på hjemmesiden [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com) .



# Index

## A

Alarm .....	39
Auto Prat .....	35
Avregistrere telefon.....	25
Avslutte samtalen .....	18
Avtalebok .....	42

## B

Bekreftelsesignal .....	36
Belteklipsen .....	12
Bruke handsfreefunksjonen .....	20
Brukerprofiler.....	28

## D

Dato/tid.....	38
Deponering .....	64

## E

Equaliser .....	30, 33
-----------------	--------

## F

Feil søknings guide .....	58
Finne en telefon.....	25
Forsterkning.....	33
Forsterkningsinnstillinger .....	29

## G

Garanti .....	67
Grunnveiledning .....	15

## H

Handsfreefunksjonen .....	20
Hodesett.....	21
Høreapparater .....	63
Hurtigtaster .....	20, 48, 51

## K

Koble til basen.....	9
Kom i gang.....	8

Kontakbok . . . . .	44	Repetere et nummer . . . . .	18
Kontrasten . . . . .	35	Ring . . . . .	18
<b>L</b>		Ring internt . . . . .	22
Lad opp telefonen . . . . .	10	Ringemelodi. . . . .	32, 40
<b>M</b>		Ringemodus. . . . .	55
Medisinsk utstyr . . . . .	63	Ringepause . . . . .	54
Motta samtaler. . . . .	18	Ringevolum . . . . .	32
<b>N</b>		<b>S</b>	
Navn på håndsettet . . . . .	34	Samsvarserklæring . . . . .	68
<b>O</b>		Samtalelengde. . . . .	21
Oppladbare batterier. . . . .	63	Samtaleloggen . . . . .	50
<b>P</b>		Sett inn batteriene . . . . .	10
PIN-kode. . . . .	41	Sikkerhetsinformasjon . . . . .	62
Plassering. . . . .	62	Skjermikonene. . . . .	13
Puls. . . . .	55	Skjermlys . . . . .	36
<b>R</b>		Slå av mikrofonen . . . . .	21
Registrere ekstra telefoner . . . . .	24	Språk . . . . .	37

Standardinnstillinger .....	66	Tone .....	55
Stoppeklokke .....	43	Toneinnstilling .....	30, 33
Strømbrudd .....	26	<b>V</b>	
Strømforsyning .....	63	Vedlikehold .....	67
<b>T</b>		Velg base .....	37
Tastelås .....	22	Viderekoble samtaler .....	23
Tastelyder .....	34	Volum .....	29, 40
Tekniske detaljer .....	65	<b>Y</b>	
Telefonbok .....	19, 51	Ytterlige tjenester .....	55
Telefonkabelen .....	10		
Telefonkonferanse .....	23		
Telefonmenyveiledning .....	15		
Tidligere innkommende samtale .....	19		
Tilbakekalling .....	54		
Tilbakestill .....	56		
Tiltenkt bruk .....	62		
Timers format .....	38		





Distribusjon: Audioline GmbH, D-41460 Neuss  
02/2013 – Utgave 1.0

