

# PowerTel 92



# Oversikt

- 1 Bilde taster
- 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3
- 3 SOS tast
- 4 Tastatur
- 5 Anrops indikator
- 6 Sett tast
- 7 Lydløs tast
- 8 Blink (R) tast
- 9 Repetisjons tast
- 10 Tonekontroll
- 11 Forsterknings tast (Boost)
- 12 Volumkontroll
- 13 Høytalende tast

## Oversikt

<b>Komme i gang</b> .....	<b>3</b>
Sjekk eskens innhold .....	3
Koble til telefonen.....	4
<b>Ring og motta samtaler</b> .....	<b>6</b>
Ring et telefon nummer .....	6
Avslutte en samtale .....	6
Svare på anrop.....	6
Aktivere/deaktivere høytalende modus .....	7
Forsterke (Boost) volumet i telefonrøret .....	8
Justere styrken på telefonrøret .....	8
Justere tonen på telefonrøret.....	8
Justere styrken på høytalende .....	8
Slå av mikrofonen (mute) .....	9
Ring med repetisjons-tasten.....	9
Direkte taster/SOS tast .....	10

<b>Telefon innstillinger .....</b>	<b>11</b>
Ringe volum .....	11
Lagre telefon nummer på direkte/SOS taster .....	11
Blinke tid (Recall) .....	12
Spesial bruk.....	13
<b>Appendiks .....</b>	<b>14</b>
Sikkerhets merknader.....	14
Tiltenkt bruk.....	14
Plassering .....	14
Høreapparat kompatibilitet .....	15
Deponering.....	16
Hjelp og støtte / Feilsøking-guide.....	17
Vedlikehold .....	17
Garanti .....	18
Samsvarserklæring .....	19

# Komme i gang

**Viktig: Vennligst vær sikker på at du har lest sikkerhets informasjonen på side 14 før du setter opp telefonen.**

**Viktig: Telefonen kan gi veldig høy lyd når (Boost) er på. Vennligst vær varsom hvis andre også bruker telefonen.**

## Sjekke eskens innhold

Den skal inneholde:

- 1 telefon base
- 1 telefonrør
- 1 spiralledning til telefonrør
- 1 ledning til telefonlinje
- 1 bordstøtte telefon
- 1 bruksanvisning


**Viktig:**

- **bruk kun de vedlagte ledninger ellers vil kanskje telefonen ikke fungere.**

## Koble til telefonen

Koble telefonrøret til basen. Putt spiral kablen inn i kontakten på telefonrøret og andre enden inn i kontakten på siden av basen. Putt Telefon linje kablen inn i kontakten i bunnen på basen og andre enden inn en telefonlinje. Legg ledningen i sin respektive kabelbane.

Hvis du vil ha telefonen på et bord må du montere bord støtten på undersiden av basen. Sporet for bord støtten er plassert over den øvre vegg monterings feste (Se bilde). Vær sikker på at alle fire feste kroker er helt på plass.

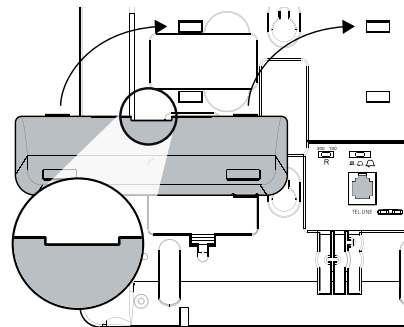


Telefonen kan også monteres på vegg. I så fall skal ikke bordstøtte monteres. Festes med to skruer til vegg.

**Advarsel: Vær sikker på at det ikke er rør eller ledninger i veggen der du vil bore hull til telefonen.**

Lag to hull over hverandre med et mellomrom på 83mm. La skruene stikke ut ca. 5mm. Plasser telefon festene på skruene og skli den forsiktig ned.

Snu telefonrør feste på basens telefonrør krybbe 180 grader slik at telefonrøret henger fast på basen.

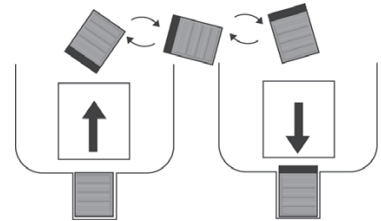



# Ringe og motta samtaler

## Ringe et telefon nummer

Løft av røret og tast telefon nummer.

eller alternativt

Trykk høyttalende tasten  og tast inn telefon nummer.


Høyttalende modus vil bli aktivert og telefon nummeret vil bli oppringt.

## Avslutte en samtale


For å avslutte en samtale kan du:

- legge på røret.

eller alternativt

- Trykke høyttalende tasten , hvis samtalen ble opprettet i høyttalende modus (vil den røde lys dioden i høyttalende tasten lyse).

## Svare på anrop

Løft av røret eller trykk høyttalende tasten .

## Aktivere/deaktivere høytalende modus

Under en samtale hvor du benytter telefonrøret kan du aktivere høytalende modus.


Trykk høytalende tast  og legg på røret.

Hvis du vil fortsette samtalen med i telefonrøret er det bare å løfte av røret igjen.

### Vennligst merk:

- Under høytalende modus vil stemmen din bli sendt via mikrofonen på basen. Snakk rett mot basen og ikke lengre i fra enn 0.5 meter.
- Høy bakgrunnsstøy kan da forstyrre for forbindelsen.

## Forsterke (Boost) volumet i telefonrøret


Du kan forsterke lyden i telefonrøret med +40dB. Trykk  . Tasten lyser opp.

**Advarsel: Denne telefonen kan gi veldig høy lyd når "Boost" er på og volum er satt til fullt. Man må være ekstremt oppmerksom på dette hvis telefonrøret byttes mellom en normalt hørende og en hørselshemmet.**

## Justere styrken på telefonrøret

Du kan justere styrken på telefonrøret ved å bruke tastene  .


## Justere tonen på telefonrøret

Du kan justere tonen på telefonrøret med tasten  , **hvis boost funksjonen (+40 dB) er på**. Trykk tasten lett for å bytte mellom de to frekvens responser (normal / bass kutt).

## Justere styrken på høyttalende

Du kan justere styrken på høyttalende ved å bruke tastene  .

## Slå av mikrofonen (mute)

Hvis du vil snakke med noen i rommet uten at den du snakker med i telefonen skal høre det, kan du slå av mikrofonen. Trykk og hold nede taste  for å slå av mikrofonen. For å slå på mikrofonen igjen, slippes knappen opp igjen.

## Ringte med repetisjons-tasten






Telefonen lagrer det siste ringte nummer.

Løft av røret eller trykk på høyttalende tasten  og så trykk  .

## Direkte taster/SOS tast

Med **bilde tastene**, direkte tastene **M1**, **M2** og **M3** kan du ringe personer uten å slå nummeret først. Hvis du legger et bilde under bilde tastene trenger du ikke å huske hvem som er lagret på denne tasten. Bruk **SOS knappen** for lagring av et nummer du vil ringe ved et nødstilfelle.

For å lagre nummer på direkte/SOS tastene vennligst se «Lagre telefon nummer på direkte/SOS taster» på side 11.

- Først løft av røret eller trykk på høyttalende tast .
- Trykk en av **bilde tastene** eller en av direkte tastene , ,   
eller .

# Telefon innstillinger

## Ringe volum

Ringetone volumet kan justeres med glide bryteren på undersiden av telefonen ( Av, Lav, Høy).



## Lagre telefon nummer på direkte/SOS taster

Lagre telefon nummere som du ofte bruker på **bilde tastene** og direkte tastene **M1**, **M2** og **M3**. Bruk **SOS knappen** for lagring av et nummer du vil ringe ved et nødstilfelle.

- Løft av røret.
- Trykk  .
- Tast telefon nummeret og trykk  igjen.
- Trykk en av **bilde tastene** eller en av **direkte tastene**  ,  ,  eller  , for å lagre nummeret på den respektive tast.

**Bemerk: For å ringe et telefon nummer fra direkte tastene se side 10.**

Ta tak i dekselet med tommel og pekefinger og fjern det som vist på bilde. Sett inn ønsket bilde (20x25 mm) under dekselet og sett det til bake over tasten.



## Blinke tid (Recall)

Du kan sette lengden på blinke signalet med bryteren på undersiden av telefonen (300ms-100ms).




Blinke funksjonen aktiveres ved å trykke  tasten.

Se også side 13.

**Blinke tid - I de fleste tilfeller skal man velge blinke tid på 100 ms. I noen tilfeller for eks. hvis man skal koble telefonen til en PABX, kan det være nødvendig å bytte 300 ms. For mere informasjon vennligst referer til bruksanvisningen til PABX.**

## Spesial bruk


### Bruke av telefonsentral

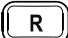Hvis telefonen er koblet til en sentral (du må eks. taste 9 for å få linje ut) kan du overføre anrop og bruk tilbake-ring ved å bruke  tasten.

Du må sjekke bruksanvisningen til sentralen for oppsett.

### Sette inn ringe pause

Hvis du må slå et nummer for linje ut og det tar litt tid for å koble opp, kan du sette inn en pause så du ikke trenger å vente på linje ut.

For å sette inn ringe pause, bare slå det nummeret du bruker for å få en ekstern linje og trykk  .

### Bruke ytterligere tjenester

Telefonen skulle være i stand til å supportere tjenester som ventende telefon og konferanse samtaler. Du må sjekke dette med din linje leverandør for mere informasjon om slike tjenester.



# Appendiks

## Sikkerhets merknader

Vennligst vær sikker på at du har lest bruksanvisningen nøye og behold denne for fremtidig bruk.

## Tiltenkt bruk

Telefonen er brukbar til å ringe med på en analog offentlig telefonlinje. Alt annen bruk er ansett som ikke tiltenkt bruk. Uautoriserte modifikasjoner og ombygginger er ikke lovlig. Ikke under noen omstendighet åpne eller forsøke å reparere utstyret selv.

## Plassering

Vær sikker på at telefonen:

- er på en tørr, flat og stabilt underlag eller montert på vegg.
- ikke er en snuble fare med sine ledninger.
- ikke er utsatt for røyk, støv, vibrasjon, kjemikalier, fuktighet, varme og direkte sollys.

## Høreapparat kompatibilitet

Denne telefonen er utstyrt med Teleslynge som er kompatibel med de fleste populære høreapparater. Da det er veldig mange høreapparater tilgjengelig, er det ingen garanti at den vil virke med alle modeller. Vennligst sjekk at ditt høreapparat har en høyere immunitet rating enn M2. Denne ratingen kan leveres av din høreapparat leverandør. Høreapparater med lavere rating enn M2 vil kanskje ikke være kompatibel med denne telefonen. Ved bruk av teleslynge sett høreapparatet i T-stilling (telespole). Dette vil koble høreapparatet til telefonen slik at du kan høre klar lyd fra telefonen uten bakgrunnsstøy. Vennligst sjekk om du har telespole på høreapparatet og om den er automatisk eller manuell. Høreapparater med høy immunitets rating og utstyrt med automatisk T-stilling skal være i stand til å detektere telefonen og automatisk stille om til dette. Høreapparater med manuell aktivering må stilles om manuelt.

**Viktig: Telefonen kan gi veldig høy lyd når (Boost) er på. Vennligst vær varsom hvis andre også bruker telefonen.**

## Deponering

Deponering av forbruksartikler skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter. Symbolet på produktet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må kasseres separat fra husholdningsavfall ved dedikerte innsamlingssteder. Batterier kan ofte kasseres der de ble kjøpt.

Emballasjen må kasseres i samsvar med lokale forskrifter.



## Hjelp og støtte / Feilsøknings-guide

### Servicetelefon

Hvis du trenger hjelp, skal du først forsøke å løse problemet ved å bruke feilsøknings-guiden under. Hvis ikke problemet kan løses, ring på tlf. +47 61 32 90 50

Åpningstiden er mandag til fredag, 08.00 til 16.00. Stengt på offentlige helligdager.

### Jeg kan ikke ringe med telefonen

- Se til at alle ledninger er koblet riktig. Hvis så kan det være en feil. Vennligst se til at du bruker ledningen som kom med utstyret.

### Vedlikehold

- Vennligst rens utstyret med en myk og lofri klut.
- Bruk aldri rensedmidler eller væske.

## Garanti

AMPLICOMMS-utstyret er produsert og testet i samsvar med de nyeste produksjons- metodene. Bruk av nøye utvalgte materialer og høyt utviklet teknologi sikrer feilfri funksjon og lang levetid. Vilåårene for garantien gjelder ikke hvor årsaken til feil på ut styret er feil som tilligger telefon nettverks operatøren eller annet mellomliggende privat hussentral-system. Vilåårene for garantien gjelder ikke de oppladbare batteriene eller kraftforsynings enhetene som brukes i produktene. Garantitid etter Norsk lov.

Alle mangler som skyldes materialer eller produksjonsfeil, og som oppstår i garanti- perioden, vil bli utbedret uten kostnader. Rettigheter til krav i henhold til vilåårene i garantien oppheves hvis produktet er forsøkt reparert eller tuklet med av kjøper eller tredjepart. Skade forårsaket som følge av feil håndtering eller bruk, feil plassering, feil tilkobling eller installasjon, force majeure eller annen ytre påvirkning, dekkes ikke av vilåårene i garantien.

Ved klager forbeholder vi oss retten til å reparere eller erstatte defekte deler eller levere et erstatnings apparat. De utbyttede delene eller apparatene blir da vår eiendom.

Rett til erstatning i tilfelle skade er utelukket der det ikke er bevis eller forsett eller grov uaktsomhet fra produsenten.

Hvis utstyret viser tegn til feil i løpet av garantiperioden, skal det returneres til selgeren som solgte deg AMPLICOMMS-utstyret sammen med kvitteringen.

Alle rettigheter til krav i henhold til vilkårene i avtalen må fremmes mot selgeren.

## **Samsvarserklæring**

Apparatet oppfyller kravene som angitt i EU-direktivet:



EU-direktiv 1999/5 om radioutstyr og teleterminal utstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar. Konformitet med ovennevnte direktiv bekreftes med CE-symbolet på apparatet.

For å se hele samsvars-erklæringen, se gratis nedlasting på hjemmesiden vår, **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**









Audioline GmbH, D-41460 Neuss

03/2017 – Edition 1.0

