

## QUICKGUIDE PARING iPhone

- 1 Velg «Bluetooth» i Innstillinger på din iPhone. Bluetooth må være aktivert.
- 2 Åpne batteri-luken på ditt Excite apparat som er satt opp som telefon-øre (Din Audiograf vet hvilket apparat dette gjelder). La den være åpen i ca 5 sekunder og så lukke den igjen. Hvis du har oppladbart Excite apparat skal du slå av apparatet og slå det på igjen.
- 3 Vent noen sekunder til høreapparatet ditt dukker opp på iPhone skjermen. Velg dette og trykk «Koble til» Når enhetene er koblet sammen høres et kort pip i ditt Excite apparat.

## QUICKGUIDE PARING Android

- 1 Velg «Bluetooth» i innstillinger. Bluetooth må være aktivert.
- 2 Åpne batteri-luken på ditt Excite apparat som er satt opp som telefon-øre (Din Audiograf vet hvilket apparat dette gjelder). La den være åpen i ca 5 sekunder og så lukke den igjen. Hvis du har oppladbart Excite apparat skal du slå av apparatet og slå det på igjen.
- 3 Vent til høreapparatet ditt dukker opp på skjermen i «Tilgjengelige enheter». Trykk på navnet for å velge det. Når enhetene er koblet sammen høres et kort pip i ditt Excite apparat.

## RESETTE HØREAPPARATENE (AQ Sound XC 9 R)

Dette kan gjøres hvis det er feil med høreapparatene. Resetting av apparatene vil ikke slette eller endre lagrede program-innstillinger.

- 1 Trykk og hold inne den nedre knappen i minst 15 sekunder. Det kommer ingen lys- eller lyd signal og det spiller ingen rolle om apparatet er av eller på når dette utføres.
- 2 Sett apparatet tilbake i laderen og vent til indikator-lyset blinker grønt. Dette kan ta inntil 30 sekunder. Høreapparatet er igjen klart til bruk.

**NB!** Hvis du ikke skal bruke apparatet på en lang stund kan du sette det i Lagringsmodus. Trykk og hold inne den nedre knappen i minst 15 sekunder. Det kommer ingen lys- eller lyd signal og det spiller ingen rolle om apparatet er av eller på når dette utføres. Dette vil unngå at battericellene blir ødelagt.



E X C I T E

by HANSATON